



Uyku Apnesi Solunum Terapi Cihazı

— Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

CPAP

APAP

BIPAP

Device Introduction



NOT

Model NatrMeet 20C, NatrMeet 20A, NatrSleep 20C, NatrSleep 20A ve NatrSleep 20A Sweet olduğunda sonuçlar aşağıdaki gibidir: Düğme aslında bir Rampa düğmesidir (⚡). Ve model NatrSleep 20S, NatrSleep 20S_Auto, NatrSleep 25S, NatrSleep 25S_Auto, NatrRes 25ST, NatrRes 25ST+, NatrRes 25V, NatrRes 25Vp, NatrRes 30ST, NatrRes 30ST+, NatrRes SVAP, NatrRes SVAP Pro olduğunda , NatrRes 30V, NatrRes 30Vp, NatrRes 30 Premium, düğme bir Sessiz düğmesidir (🔇).

Farklı modeller farklı işlevlere ve yapılandırmalara sahip olabilir. Lütfen gerçek ürün yapılandırmasına bakın.

Cihaz Bileşimi

Cihaz ana bilgisayar, nemlendirici, hava filtresi, güç kablosu, güç adaptörü, SD kart, solunum tüpü, ısıtmalı solunum tüpü , maske, ve sepet.

Kurulum

1

Cihazın üst kısmındaki su haznesini yerleştirin



2

Su haznesine yeterli miktarda saf sudökün. Maksimum su seviyesinin aşılmamasına dikkat edilmelidir.



Kurulum


3

Nemlendirici kapağını takın, her iki taraftan "tık" sesi çıkaran nemlendirici kapağını kapatmak için hafif bir baskı uygulayın.



4


Ana bilgisayarın SD kartının düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

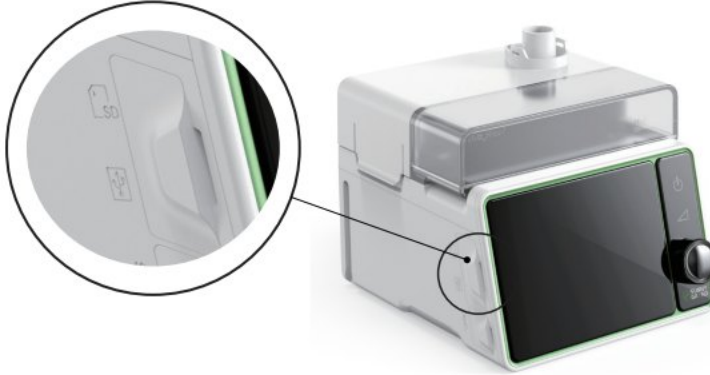

Kurulum


5

Borunun bir ucunu cihazın hava çıkışına, diğer ucunu ise maske üzerindeki hava kaçağı çıkışına bağlayın.

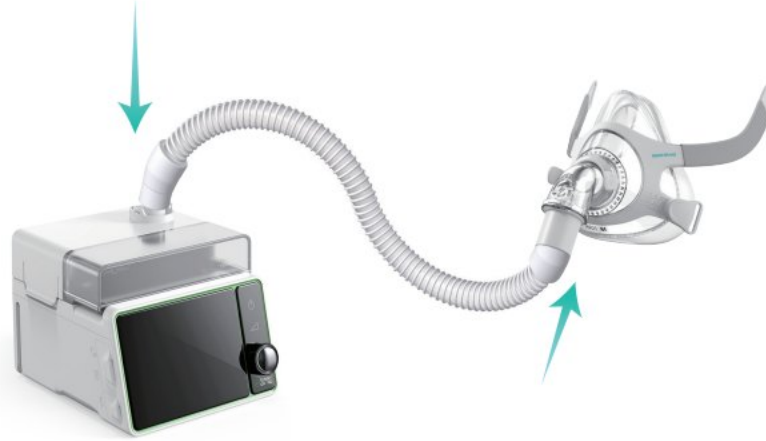

6

Güç adaptörünün DC konektörünü cihazın sağ tarafındaki DC güç girişine takın ve yerine kilitlemek için saat yönünün tersine 90° çevirin. Ardından AC konektörünü bir AC güç prizine takın.

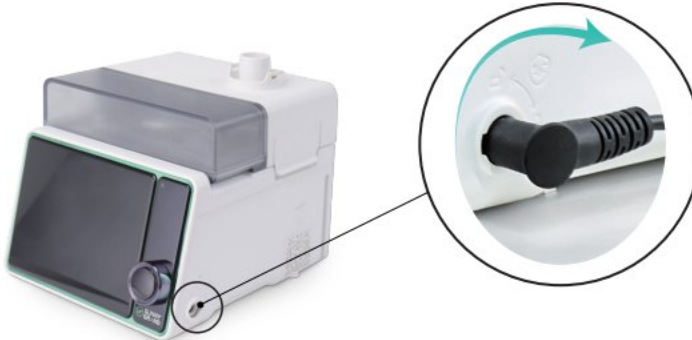

kurulumdan sonra cihazı başlatın, sistem ana arayüze girecektir.

Parametre Ayarları

NOT

Tedaviye başlamadan önce klinik parametreler bir klinisyen tarafından veya onun gözetimi altında belirlenmelidir.

Cihazı ilk kez kullanırken hastanın tedaviye alışması biraz zaman alabilir. Optimum tedavi etkisini elde etmek için genellikle bir ila iki hafta gerekir. Kullanıcılar, hastaların tedaviye uyumunu kolaylaştırmak için cihazın parametrelerini ayarlayabilir.


Aşağıdaki parametreler Dokunmatik Ekranın çalışmasına ilişkindir. **Tamam** (Düğme düğmesine basarak) + Saat Yönünde Döndür veya Saat Yönünün Tersine Seç + **Tamam** (Düğme düğmesine basarak) ek seçeneklerdir. Bu aynı işlemin yapılmasına olanak sağlar.

A

Rampa Süresi Ayarları

Kullanıcılar tedavi konforunu artırmak için **Rampa sür. (Rampa Süresini)** ayarlayabilir. Rampa süresi etkinleştirildikten sonra cihaz bir başlangıç basıncı üretir ve ardından bunu rampa süresi ayarına göre kademeli olarak terapötik basınca yükseltir. Bu hastanın uykuya dalmasına yardımcı olur.

1. Rampa Süresi ayar arayüzüne girmek için **Konfor > Rampa sür. (Rampa Süresini)**'ne dokunun.

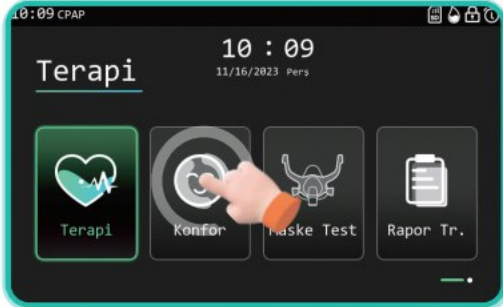

Parameter Settings


2. Arayüzün üst kısmında, **Rampa sür. (Rampa Süresini)** ayarlamak için **Ayarlama Kaydırıcısını** sola ve sağa kaydırın.



Nem Seviyesi Ayarı

Tedavi konforunu artırmak için kullanıcılar Nem Seviyesi ayarlayabilir.

1. **Konfor > Nem Seviyesi** girmek için Nem Seviyesiarayüzü ayarlama.

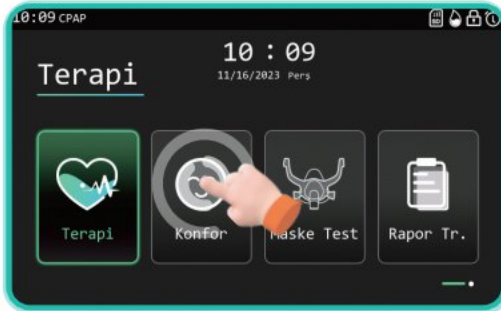

Parameter Settings

2. **Nem Seviyesi** ayarlamak için arayüzün üst kısmındaki **Ayarlama Kaydırıcısını sola ve sağa sürükleyin.**

Nem Seviyesi tedaviden önce veya tedavi sırasında ayarlanabilir. Seçenekler arasında OFF, Seviye 1 ila 6 ve OTO.(OTOMATİK) yer alır. Varsayılan Seviye 3'tür.



Aşağıda ısıtmalı taban plakasına karşılık gelen nem seviyelerinin sıcaklık aralıkları verilmiştir.

Level 1: $30^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

Level 2: $37^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

Level 3: $44^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

Level 4: $49^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

Level 5: $56^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

Level 6: $60^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

Oto. (Otomatik): cihaz, mevcut ortam sıcaklığına ve neme bağlı olarak en uygun son nem kontrolünü (%70-%75) otomatik olarak hesaplar ve üretir, aynı zamanda yoğuşma oluşumunu en aza indirir.



Günlük Kullanım

• Tedaviyi Başlama

1. Hastayı yatağa yatırın ve tüpü ayarlayın. Hasta uykudayken ve kendini yeniden konumlandırırken bile tüpün serbestçe hareket edebildiğinden emin olun.
2. Hasta maskeyi taktıktan sonra, nefes alma sırasında hava kaçağı kalmayacak şekilde sıkılığını ayarlayın.
3. Tedaviyi başlatmak için Başlat/Durdur düğmesine () basın.

• Tedaviyi Durdurma


1. Tedaviyi durdurmak için **Başlat/Durdur** () düğmesine uzun süre basın.
2. Maskeyi çıkarın, güç kablosunu çıkarın ve cihazı kapatın.

NOT

Tedavi sırasında tedaviyi durdurmak için lütfen gücü doğrudan kesmeyin.

• Kapat

Tedaviden sonra, DC konektörünü saat yönünde 90° döndürün ve cihazın sağ tarafındaki DC güç bağlantı noktasından çıkarın. Ardından, cihazı kapatmak için AC konektörünü AC güç prizinden çıkarın.

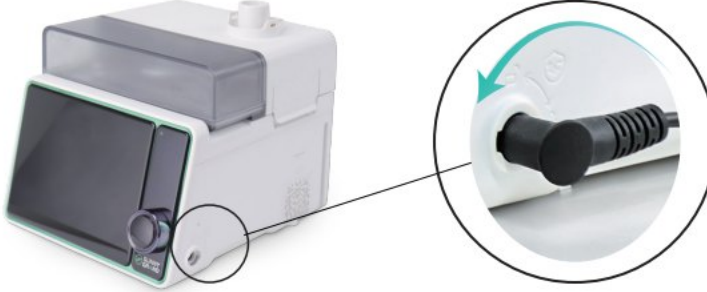

NOT

Tedaviyi sonlandırmak ve elektriği kesmek ekipmana zarar vermez.

• Temizlik

Cihaz Bileşenleri/Ak-sesuarları	Deterjan	Sıklık	İşlem
Ana Bilgisayar	Nötr deterjan	Kullanmadan önce ve sonra günde en az 2 kez	1.Cihazı temizlemeden önce ana bilgisayar gücü ve AC gücü kapatılmalı ve bağlantısı kesilmelidir. 2.emiz, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezi ılık suya veya nötr bir deterjana batırın. 3.Ana bilgisayarın ön panelini ve muhafazasını silin. 4.Ana bilgisayarı temizledikten sonra temiz, kuru ve yumuşak bir bez kullanarak kurulayın. 5.Silme işleminden sonra nesneyi havayla kuruması için temiz, iyi havalandırılan bir alana yerleştirin ancak doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Su haznesi	Nötr deterjan	Her 7 günde bir Hastaları değiştirmeden önce ve sonra.	1.Su haznesini her yedi günde bir veya hasta değiştirilmeden önce konakçıdan çıkarın. 2.Su haznesini ılık suya veya nötr bir deterjana batırın, ardından yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle silerek temizleyin. Deterjanla temizledikten sonra, deterjan

• Temizlik

Cihaz Bileşenleri/Aksesuarları	Deterjan	Sıklık	İşlem
			kalmamasını sağlamak için en az üç kez 5 dakika temiz suyla durulayın. 3.Temizledikten sonra yüzeyi temiz, kuru ve yumuşak bir bezle silin. 4.Sildikten sonra iyi havalandırılan bir alanda havayla kurutun, ancak güneşe maruz kalmaktan kaçının.



UYARI

- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin.
- Kullanımda olan cihazı tamir etmeyin veya bakımını yapmayın.

NOT

- Cihazı ve aksesuarlarını temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, %80'den fazla konsantrasyona sahip alkol, klor içeren maddeler, aseton veya diğer solventleri kullanmayın.
- Kaynar su ile temizlemeyin. Aşırı ısıtılırsa malzeme erken eskiyebilir.
- Deterjanla temizledikten sonra nemlendirilmiş tüm parça aksesuarlarını ve bileşenlerini temiz suyla iyice durulayın; daha sonra kireç birikintilerinin birikmesini önlemek için tüm parçaları tükür bırakan bir bezle kurulaşın.



Aksesuar Deęiřtirme Döngüsü

Hastaların en etkili ve konforlu tedaviyi almasını sağlamak için çeřitli aksesuarların düzenli olarak deęiřtirilmesi önerilir. En önemli üç aksesuarın deęiřtirme döngüleri referans amacıyla ařaęıda listelenmiřtir.

Deęiřtirme talimatları için lütfen Uyku Apnesi Solunum Terapi Cihazının kılavuzuna bakın.




Maske

Deęiřtirme döngüsü: 6 ay



Tüp

Deęiřtirme döngüsü: 6 ay

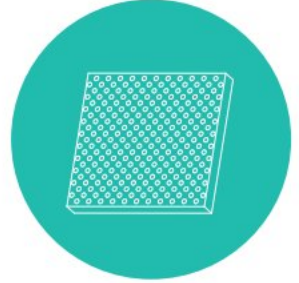

Hava filtresi

Deęiřtirme döngüsü: 3~6 ay

Ailenizin saėlıėını korumak

Mesafe ne olursa olsun

Bakım her zaman yanınızda.



SUNNYGRAND

WWW.SUNNYGRAND.COM

SHENZHEN SUNNYGRAND HEALTHCARE TECHNOLOGY CO., LTD.

✉ support@sunnygrand.com

📍 Rooms 801, 802, 803, 805 and 810, Building 5, Nam Tai Inno Park, Tangwei Community, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518107, P.R. China

SG-A101

S-01.20.004.0007[V1.1]

Revizyon Tarihi: 2026-01-04